


スカットクリーン

パラマウントベッド

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します。寝たままでも、座ったままでも使用でき、持ち運びもできるので、トイレに移動・移乗できない方のより自立した排尿を支援することができます。

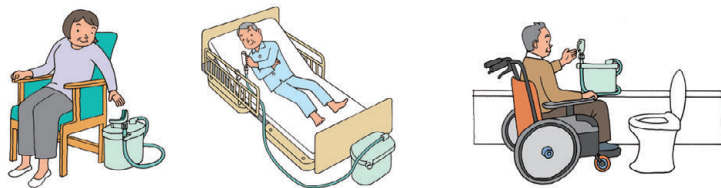

スカットクリーンは、尿意の自覚があり、ご自分で、または介護する方の手助けによりレシーバーをあてがうことができる方にご利用いただけます。＊尿意の自覚のない方、尿が常に出続ける方はご利用になれません。＊大便には利用できません。




画像は男性用レシーバー装着済みのもの

本体サイズ	本体重量
幅233×長さ378×高さ273mm	5kg

スカットクリーンの仕組み

レシーバーの尿センサーが尿を感知すると、モーターポンプが作動して尿をタンクに吸引します。尿センサーが尿を感知なくなると自動的に停止します。吸引スイッチを使えば、排尿する前に手でモーターポンプを作動させることもできます。

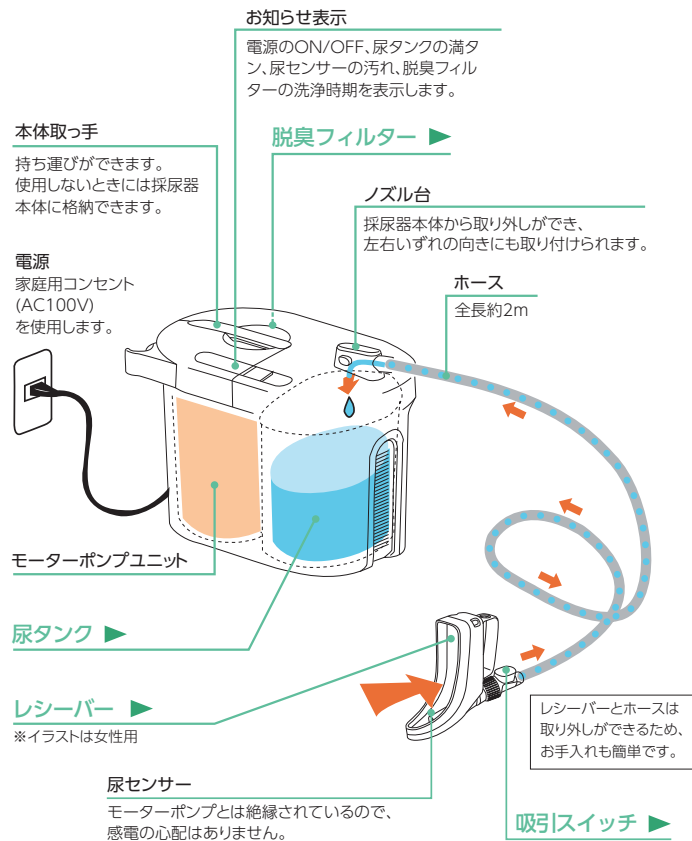

▶ レシーバー よりフィットしやすくなりました。

男性用レシーバーには、就寝時などに長時間装着し続けるためのシリコン製アタッチメントを付属。女性用レシーバーには、身体に触れる部分に丸みをつけるとともに、よりやわらかい素材を使用しています。



注意 長時間の装着により、かゆみ・かぶれなどを生じる恐れがあります。各部品の定期的な洗浄・消毒や身体との接触部を拭くなど、衛生面に十分注意してください。また肌に合わない場合は、夜間など装着した状態での使用は控えてください

▶ 吸引スイッチ 漏れへの不安をやわらげます。

排尿する前から手でモーターポンプを作動できるので、はじめて使用する方などの漏れに対する不安感をやわらげることができます。また、尿センサーが汚れている場合でも、吸引スイッチを使って作動させることができます。



▶ 脱臭フィルター 気になるにおいを抑えます。

光触媒素材の脱臭フィルターを装備。フィルターは、洗浄して繰り返し使用することができます。脱臭フィルターを洗浄する時期は、ランプの点灯でお知らせします。



▶ 尿タンク 後始末は1日1回程度でOKです。

尿タンクの容量は3リットル。一般的な成人の約1日分をためられるので、後始末は1日1回程度で済みます。また、ふたを開けなくても使用量の確認ができ、満タンになるとランプとブザーでお知らせします。尿タンクは取り外し式なので、尿の処理や洗浄も簡単です。



■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。



＊尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

採尿器本体：KW-65H



アタッチメントが尿タンク・ブラシ入れが付属します。

男性用レシーバーセット：KW-65MRT



ハンドルが尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用レシーバーセット：KW-65WRT

商品名	品番	TAIS	商品番号	月種レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1				
男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格		介護保険購入対象品(税別)		
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格		介護保険購入対象品(税別)		